

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

PROCEDIMIENTO PRE-TRATAMIENTO

¡IMPORTANTE! No utilizar el Lantitaps en caso de perforación de la membrana timpánica y/o cuando haya inflamación del canal.

¡IMPORTANTE! No se puede utilizar el dispositivo si en irrigaciones precedentes del canal auditivo ha padecido dolor o ha tenido algún problema.

¡IMPORTANTE! Antes de la irrigación con el Lantitaps se recomienda la comprobación, mediante inspección directa, de la presencia de tapón de cerumen en el canal auditivo externo.

¡IMPORTANTE! Aun siendo prescindibles, se recomienda el uso de sustancias ablandadoras del cerumen antes de irrigar el oído. Se recomienda su aplicación, al menos 15 minutos antes de la maniobra, para reducir el número de irrigaciones necesarias para limpiar el canal auditivo con éxito, mejorando así la efectividad del Lantitaps.

¡IMPORTANTE! Cuando una/un profesional utilice el Lantitaps por primera vez y antes de utilizarlo con un paciente, se recomienda llenar con agua y vaciar el depósito un par de veces para observar la presión de salida del agua.

¡IMPORTANTE! Si el dispositivo no se utiliza frecuentemente, hacer varias irrigaciones directamente en la yema de los dedos de una mano para probar el chorro de salida del agua antes de efectuar la irrigación en el oído.