

FUNCIONAMIENTO

PREPARACIÓN DEL LANTITAPS PARA LA IRRIGACIÓN

- a) Preparar suficiente cantidad de agua limpia (mínimo 200 ml) en un recipiente para poder cargar el Lantitaps.
- b) Comprobar que el agua se encuentra tibia (37°C aproximadamente), para evitar la aparición de vértigo en el paciente por estimulación del reflejo calórico con la irrigación.
- c) Retirar el espéculo intercambiable de la parte frontal del Lantitaps (Figura 2).
- d) Sumergir la boquilla del Lantitaps en el recipiente con agua que se ha preparado previamente (Figura 3).
- e) Para cargar el Lantitaps, apretar el gatillo hasta el fondo y estirar del tirador de la parte posterior hacia atrás, mientras se mantiene sumergida la boquilla (Figura 4). Mantener el gatillo apretado si se quiere mantener una presión constante.
- f) La mejor posición para cargar el Lantitaps es que el brazo con el que se sostiene el mango (mejor del lado dominante) se mantenga estirado, por lo que el recipiente deberá estar en una posición más baja que el antebrazo.
- g) Al notar que el tirador ha llegado a su posición final, dejar de apretar el gatillo y retirar la boquilla del agua. El Lantitaps está cargado.
- h) Colocar de nuevo el espéculo intercambiable en la parte frontal del Lantitaps (Figura 5).
- i) El Lantitaps está listo para su uso.