

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

PROCEDIMIENTO POST-TRATAMIENTO

¡IMPORTANTE! El éxito del lavado se verifica de forma directa mediante la visualización de la membrana timpánica ante la desaparición del cerumen que la dificultaba, y de forma indirecta mediante la detección de cerumen en el sobrante salido durante la maniobra.

¡IMPORTANTE! Después de haber eliminado el cerumen, secar el pabellón auricular.

¡IMPORTANTE! En caso de encontrar dificultades para la eliminación completa del tapón de cerumen tras irrigar los 400ml recomendados por sesión, se recomienda la instalación de sustancias ablandadoras del cerumen en el canal auditivo y repetir la irrigación otro día.

¡IMPORTANTE! Vaciar completamente el agua del dispositivo una vez utilizado y secarlo completamente antes de guardarlo.